



### STAP 1

Open de verpakking en haal de test eruit. Houdt de test aan de bovenkant vast en raak het onderste deel niet aan.




### STAP 2

Pak de test op de juiste manier vast en breng deze in positie.



### STAP 3

Breng de test in, tot aan de baarmoedermond.

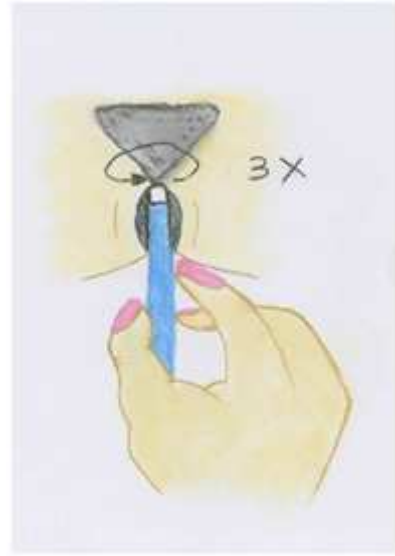


### STAP 4

Nadat de test ingebracht is, draait u deze 3x rond



### STAP 5

Haal de test uit uw vagina. Breek de onderste helft van de test af en stop dit in het meegestuurde buisje. Voeg dat buisje in het buisje met de bruine dop.

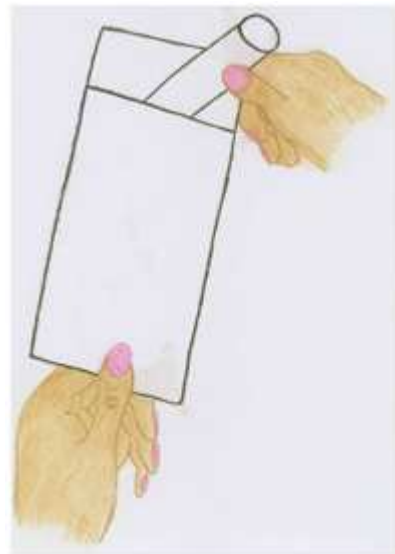

### STAP 6

Stuur de buisjes in de bijgesloten envelop naar het laboratorium.